


# Catalyst\* SmartQC\* Control

## 快速參考指引

### 試劑套組儲存與檢體製備注意事項

- + 不須回溫或製備液體，從冷藏取出後即可上機。
- + 請冷藏。切勿冷凍。
- + 未開封的包裝可於室溫下儲存最多 8 小時，最多可重複儲存 5 次。若 8 小時內未使用，請將未使用且未拆封的材料冷藏。
- + 若意外冷凍：
  - + <8 小時，使用前，請在室溫下解凍至少 60 分鐘。
  - + >8 小時，請丟棄。

### Catalyst SmartQC 讓一切變得簡單 - 放入即可使用

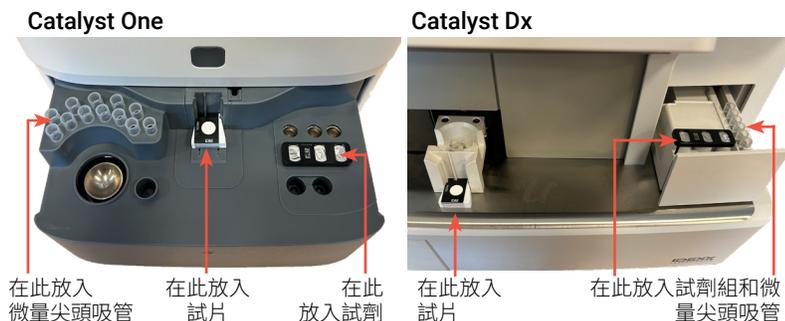

### 常見問與答

問題	解答
Catalyst SmartQC Control 是什麼？	Catalyst SmartQC Control 是品管檢測套組 (包含一個 Catalyst 套組與一個試劑套組)，用於驗證您的 Catalyst One* 生化分析儀或 Catalyst Dx* 生化分析儀是否正常運作。
Catalyst SmartQC 的使用時機為何？	Catalyst SmartQC 應在每月清潔分析儀的內部元件之後、安裝時，或每次移動分析儀之後執行。
如何執行 Catalyst SmartQC？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 清潔 Catalyst 分析儀的內部元件。</li><li>2. Catalyst One：點選 IDEXX VetLab* Station 主畫面的 <b>Catalyst One</b> 圖示，然後點選 <b>Maintenance (保養) &gt; SmartQC &gt; Run SmartQC (執行 SmartQC)</b>。 或 Catalyst Dx：點選 IDEXX VetLab Station 主畫面的 <b>Catalyst Dx</b> 圖示，然後點選 <b>SmartQC &gt; Run SmartQC (執行 SmartQC)</b>。</li><li>3. 按照 IDEXX VetLab Station (Catalyst One) 觸控螢幕的指示，或 Catalyst Dx 觸控螢幕 (Catalyst Dx) 的指示，將 SmartQC 套組放入您的分析儀並完成執行。</li></ol>
可以使用患者檢體或其他 Catalyst 套組/試片執行 Catalyst SmartQC 嗎？	不行，僅能放入尖頭吸管、Catalyst SmartQC 套組，以及 QC 測試所需的試劑— <b>請勿</b> 放入檢體杯、全血分離杯或其他套組/試片 (包括以前每月 QC 所需的 Catalyst* Lyte 4 套組)。
Catalyst SmartQC 的執行時間為多久？	Catalyst SmartQC 上機不到 15 分鐘即可得到結果。
Catalyst SmartQC 是否會提供結果？	是，Catalyst SmartQC 將提供「Pass (通過)」或「Out of range (超出範圍)」結果： <ul style="list-style-type: none"><li>+ <b>Pass (通過)</b> 結果確認您的分析儀運作正常，您可以按需要繼續使用分析儀。</li><li>+ <b>Out of range (超出範圍)</b> 結果表示在測試過程檢測到問題。若收到「Out of range (超出範圍)」結果，請使用 Catalyst SmartQC 新試片與試劑重新執行。若第二次測試結果仍「Out of range (超出範圍)」，請聯絡 IDEXX 客戶與技術支援部門尋求協助。</li></ul>
如何設定提醒，通知我何時需要針對我的分析儀執行 Catalyst SmartQC？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Catalyst One：點選 IDEXX VetLab* Station 主畫面的 <b>Catalyst One</b> 圖示，然後點選 <b>Maintenance (保養) &gt; SmartQC</b>。 或 Catalyst Dx：點選 IDEXX VetLab Station 主畫面的 <b>Catalyst Dx</b> 圖示，然後點選 <b>Quality Control (品管)</b>。</li><li>2. 在畫面左側，使用相應的下拉選單來選擇您希望接收定期提醒訊息的時間。</li></ol>