


# 啟用針對特定結果的判讀註解

Catalyst™ 皮質醇檢測的判讀註解可以協助您確定最適合動物患者的後續治療計畫。為充分善用這些重要資訊，請想想下列問題並按照以下步驟操作：

- + 是否需要為同一動物患者進行多次皮質醇檢測？若答案為是，且您已執行初次皮質醇檢測，請遵循下方的「附加檢測……」指示操作，以確保每個定量結果都依序分組並取得**完整判讀註解**。
- + 您是否已輸入流程資訊？為接收特定結果的判讀註解，您必須為該動物患者的檢測選擇正確流程及流程步驟。請務必遵循下方適用於您分析儀的特定工作流程：

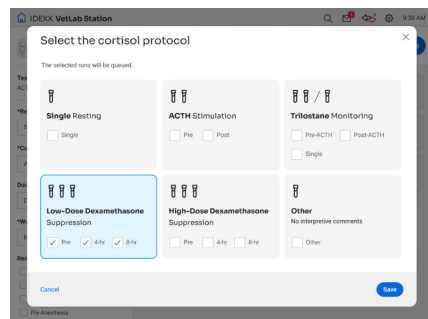

### 初次皮質醇檢測

#### Catalyst One™ 生化分析儀



在 IDEXX VetLab™ Station 上啟動檢測。在「選擇儀器」畫面上，點選 **Catalyst One**，然後點選**皮質醇**。選擇所需流程及其額外流程步驟，點選**儲存**，然後點選**執行**。

### 附加檢測/多步驟皮質醇檢測

處理初次檢測時所選的所有流程步驟，都會顯示在 IDEXX VetLab Station 主畫面的「進行中」清單。輪到處理下一個檢體時，請點選清單中的下一個可用檢測，點選**已排入佇列**，然後點選**開始檢測**。

#### Catalyst Dx™ 生化分析儀



照常在 IDEXX VetLab Station 上啟動檢測。檢測結束時，請依提示指定流程與流程步驟，然後點選**提交**。

**注意：**若您選擇稍後再輸入流程/流程步驟，請在「進行中」清單點選該動物患者，點選**新增詳情**，然後選擇該動物患者的流程資訊。

為確保附加結果與初次結果分在同一組並取得判讀註解：

1. 在 IDEXX VetLab Station 上找到該動物患者的初次皮質醇結果，或從主畫面的「待驗檢體」清單中選擇適用的動物患者。
2. 點選**新增檢測**，然後點選**附加結果**。
3. 在「選擇儀器」畫面上，選擇 **Catalyst Dx**。
4. 檢測結束時出現提示後，請選擇該次檢測的流程資訊，然後點選**提交**。

**重要提示：**若您同時擁有 Catalyst One 與 Catalyst Dx 分析儀，並打算追蹤動物患者的皮質醇結果趨勢及/或執行附加檢測/多步驟皮質醇檢測，IDEXX 建議您在同一台分析儀上使用相同的檢體類型執行所有皮質醇檢測。

### 如何檢視定量結果與判讀註解

點選 IDEXX VetLab Station 左下角的訊息，該訊息會指出動物患者的結果已就緒。在多步驟皮質醇檢測中新增附加檢測時，結果會從最新的附加檢測（最上方）到初次檢測（最下方）依序列出；綜合判讀註解會與最新的結果一起顯示。