


快速參考指南

注意：有關 Catalyst One* 化學分析儀的詳細使用說明，請參閱《IDEXX Catalyst One* 化學分析儀操作指南》。

Catalyst One* 分析儀元件

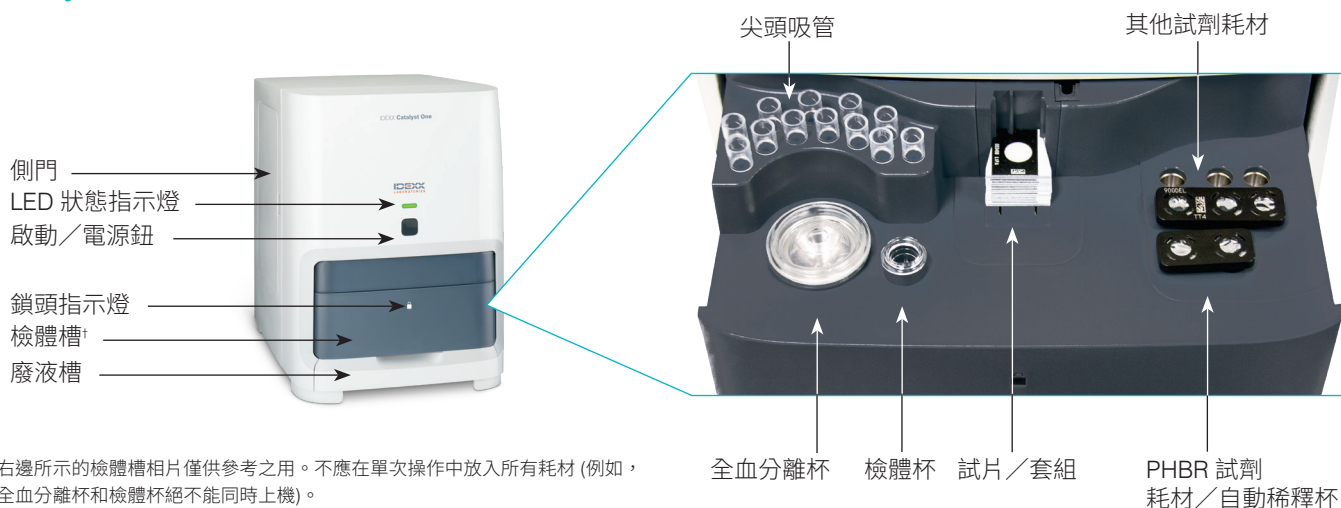

右邊所示的檢體槽相片僅供參考之用。不應在單次操作中放入所有耗材 (例如，全血分離杯和檢體杯絕不能同時上機)。

所需檢體量



[†]執行 Chem 17 套組和電解質檢驗時，建議檢體量為 300 µL。

執行檢體

1. 在 IDEXX VetLab* Station 上輸入檢體資訊。
2. 將試片和檢體放入檢體槽中。
3. 關閉檢體槽，按下分析儀上的「啟動」按鈕。

稀釋

Catalyst One 分析儀支援自動稀釋 (分析儀會自動混合檢體和稀釋液) 與手動稀釋 (操作者自行稀釋檢體)。**請勿稀釋執行血氨、苯巴比妥、果糖胺、總甲狀腺素、SDMA、黃體素、膽酸或電解質檢測的檢體。**

執行品管程序

1. 點選 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 **Catalyst One** 圖示。
2. 點選**維護**，然後點選**品管**。
3. 點選您正在使用的品管批號，然後點選**執行品管**。
4. 遵循製備和執行品管程序的螢幕指示操作。

清潔內部元件 (每月)

1. 點選 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 **Catalyst One** 圖示。
2. 點選**維護**、點選**清潔**，接著遵循這些螢幕指示操作。

- a. 打開分析儀的側門。
- b. 提升轉盤蓋直到綠色箭頭處的磁性吸住分析儀內側。
- c. 取出轉盤。
- d. 使用 IDEXX 提供的酒精棉片擦拭儀器內部培養圈和觀測窗。
- e. 清潔轉盤上的白色參考磚。
- f. 使用乾的拭鏡紙巾，將觀測窗和轉盤上的白色參考磚擦乾。
- g. 將轉盤裝回原位，將轉盤蓋放下直到牢固扣住為止，然後關閉側門板。
- h. 點選**完成**。

