

IDEXX VetLab* UA* 分析儀

快速參考指南

讀取 IDEXX UA* 試紙


使用未離心過的新鮮尿液。徹底混和尿液檢體。執行檢測時，檢體應為室溫，且放置時間未超過一小時。

如需更多指示，請參閱 IDEXX VetLab* UA* 分析儀操作手冊。




- 1** 使用吸量管將尿液檢體滴在 UA 試紙上並浸潤試紙，請確保所有檢測襯墊都浸濕。請勿彎曲試紙。

重要提示：IDEXX VetLab UA 分析儀上僅可使用 IDEXX UA 試紙。請勿使用任何他牌試紙。

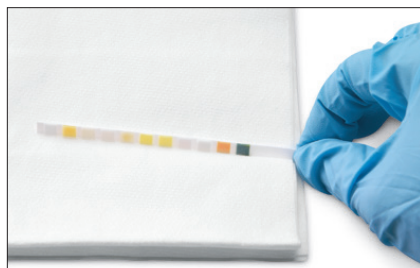

- 2** 將檢測試紙長緣及背面在吸水表面(如紙巾)上快速(約一秒鐘)輕擦一下。

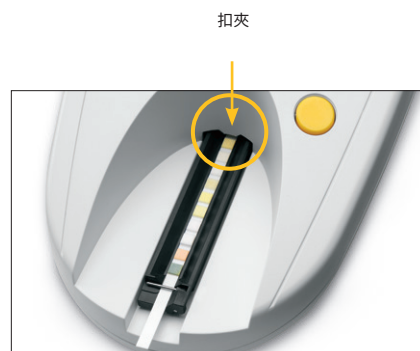

- 3** 將檢測試紙放入檢測試紙托盤，檢測襯墊朝上，使其前緣被插槽處的扣夾扣住。固定桿必須打開。必須將試紙一端約 2 公釐的部分固定在扣夾下。



- 4** 按下 **Start** (開啟) 鍵。嗶聲響起。托盤稍微向前移動，固定桿關閉。

檢測試紙托盤會自動將檢測試紙拉入分析儀中並讀取，然後恢復至起始位置。分析儀恢復測量就緒模式前，請勿取出檢測試紙。從您按下 Start (開啟) 鍵直到所有測量完成，約需 80 秒。



- 5** 在結果列印出來後，取下並丟棄試紙。以不起毛的擦拭巾擦掉任何殘留在托盤的尿液。

注意：如果 UA 分析儀已連線至 IDEXX VetLab Station，檢測結果會自動傳輸。

IDEXX 技術支援部門

中國 400-678-6682

南韓 080 7979 133

臺灣 0800 291 018#1

日本 0120-71-4921