

# 清潔 SNAP Pro\* 分析儀

## 清潔內部元件 (每週或根據需要執行)



1. 關閉分析儀的電源並拔除電源和/或乙太網路連接埠的連線。




2. 在已關閉電源的分析儀的底部，使用平頭螺絲起子或硬幣將 2 顆銀色扣件以逆時針方向轉動四分之一圈。



3. 拆下分析儀的基座。



4. 請使用不起毛的擦拭布或棉棒，然後沾 70% 的異丙醇、溫和的肥皂水或 10% 的漂白水來清潔**整個**基座。

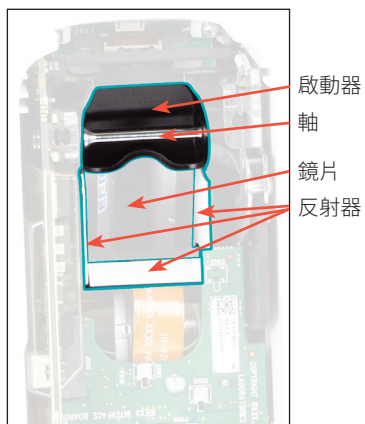

5. 請使用全新且不起毛的擦拭布或棉棒，然後沾 70% 的異丙醇、溫和的肥皂水或 10% 的漂白水來清潔 3 個白色反射器、軸與啟動器。「請勿」清潔鏡片。



6. 待基座乾燥之後，將其重新裝回分析儀並確保鎖至定位。



7. 將銀色扣件以順時針方向轉動四分之一圈以將基座鎖至定位。



8. 確保基座與銀色扣件與分析儀齊平且鎖至定位。**若未適當固定基座與扣件可能會影響分析儀效能。**

## 清潔外殼與螢幕 (根據需要執行)



請使用不起毛的抹布並沾 70% 的異丙醇、溫和的肥皂水或 10% 的漂白水來清潔外殼與螢幕。

**「請勿」** 擦拭電源按鈕下方的通風口或 USB/電源/乙太網路連接埠。

清潔時，不可讓分析儀接觸：

- X** 有機溶劑
- X** 氨基清潔劑
- X** 馬克筆
- X** 含揮發性液體的噴霧劑
- X** 殺蟲劑
- X** 消毒劑
- X** 擦亮劑
- X** 室內空氣清新劑