

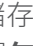
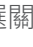

SNAP Pro 分析儀

SNAP Pro* 分析儀是一個寵物檢測專用的自動化工具，可將結果傳送至動物患者的電子病歷，節省時間與花費。SNAP Pro 剛推出時，您可以體會到自動化帶來的好處，但仍需手動輸入 SNAP* 檢測結果。現在，SNAP Pro* 分析儀的全新 ProRead* 功能可實現 SNAP 檢測結果的自動讀取，省去您 SNAP 工作流程的另一個步驟，使您的 SNAP Pro 更有價值。

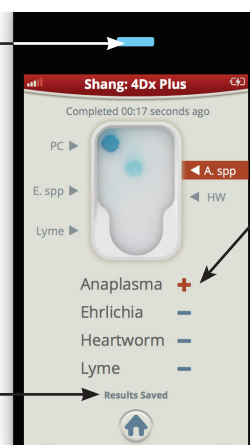
檢視 ProRead 結果

以您喜好的工作流程執行 SNAP 檢測。分析完成時，您會注意到「結果」畫面看起來與沒有 ProRead 功能時相似。差別在於現在會直接提供結果給您，您無須檢視結果視窗並輸入每一項陽性或陰性結果。

除了自動化結果，分析儀上狀態燈的顏色會隨著結果而變化。當狀態燈顯示：

- **綠色**—所有結果皆為陰性。
- **藍色**—至少一個結果為陽性。
- **黃色**—因結果視窗中的斑點顏色過淡或有非預期顏色產生 (如碎片或藍色色調)，需要確認結果。如果您認同所顯示的結果，請點選**勾號**圖示  儲存結果。否則，請點選適當的結果圖示，然後點選**勾號**圖示 。若要取消檢測並返回主畫面，請點選**關閉**圖示 。

狀態燈顏色表示結果狀態。



陽性結果會以紅色標示。

結果會自動儲存。

綠色狀態 =

全部結果皆為**陰性**。

藍色狀態 =

至少一個結果為**陽性**。

黃色狀態 =

需要使用者操作以完成檢測。



需要協助嗎？請造訪 idexx.com/prohelp 參閱實用安裝影片及支援文件。