



IDEXX SNAP[®] 檢測試劑快速參考指南

SNAP 檢測套組一覽表.....	3
SNAP Pro* 分析儀.....	4
SNAP* 4Dx* Plus 檢測	5
SNAP* 心絲蟲 RT 檢測	6
SNAP* 猫三合一检测.....	7
SNAP* FIV/FeLV 二合一快速檢測	8
SNAP* cPL* 檢測	9
SNAP* fPL* 檢測.....	10
SNAP* 犬细小病毒檢測.....	11
SNAP* 梨形鞭毛蟲檢測.....	12
SNAP* 貓 proBNP 檢測.....	13
SNAP* Lepto 快速檢測	14

圖例

-  適用畜別。
-  存放於室溫下或冷藏儲存。
-  判讀時間 (以分鐘為單位)。
-  冷藏儲存。

執行檢測前，所有元件務必恢復到室溫。

SNAP 檢測套組一覽表

檢測名稱†	適用檢體類型				儲存* 冷藏 = 2°C–8°C 室溫 = 2°C–25°C	檢體量	溶液滴數	判讀時間 (分鐘)
	糞便	抗凝血 全血	血漿	血清				
SNAP® 4Dx® Plus 檢測		●	●	●	冷藏儲存至有效日期， 室溫可儲存 6 個月	3 滴	4	8
SNAP® 心絲蟲 RT 檢測		●	●	●	室溫儲存至有效日期	3 滴	4	8
SNAP® Feline Triple		●	●	●	冷藏儲存至有效日期	3 滴	4	10
SNAP® FIV/FeLV 二合一快速檢測		●	●	●		3 滴	4	10
SNAP® cPL® 檢測				●		3 滴	4	10
SNAP® fPL® 檢測				●		3 滴	4	10
SNAP® 犬細小病毒檢測	●				室溫儲存至有效日期	以整個棉棒尖端 沾取薄薄一層 糞便物質。	5	8
SNAP® 梨形鞭毛蟲檢測	●				冷藏儲存至有效日期	以整個棉棒尖端 沾取薄薄一層 糞便物質。	5	8
SNAP® 貓 proBNP 檢測			●	●		3 滴	5	10
SNAP® Lepto 快速檢測				●		3 滴	4	10

*完整儲存規定請參閱包裝內仿單。

†開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

SNAP Pro* 分析儀

重要提示：準備SNAP檢測試劑盒，但不要按壓啟動檢測。*

SNAP Pro 提示時，將 SNAP 檢測試劑盒輕輕滑入分析儀底部的口槽 (有孔端在前) 直到卡至定位。




錯誤




正確

當分析完成時，結果會顯示在結果畫面上，並自動儲存在分析儀上。狀態燈的顏色表示執行的結果：

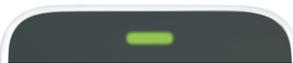

恆亮綠色

所有結果皆為陰性。

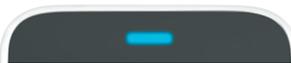

藍色快閃

至少一個結果為陽性。



黃色快閃

需要目測確認。
(詳細資訊請見操作員手冊)。

解讀 SNAP Pro 圖示

圖示	說明
	無線 (Wi-Fi) 訊號狀態 (5 條灰色列 = 最佳訊號；5 條紅色列 = 無訊號)
	Wi-Fi 通訊中斷
	透過有線連線 IDEXX VetLab Station 並與其通訊 (紅色圖示表示分析儀為離線)
	乙太網路連線中斷
	電池正在充電

圖示	說明
	軟體升級可供使用 (僅限 SmartService 解決方案客戶)
	警告通知 (灰色圖示表示已檢視警告而未解決)
	錯誤通知 (灰色圖示表示已檢視錯誤而未解決)
	與 IDEXX VetLab Station 的通訊中斷

如需詳細資訊或欲訂購本產品，請瀏覽 idexx.com/prohelp。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

SNAP[®] 4Dx[®] Plus 檢測

每年為犬篩檢一次產生病原的六種病媒傳播疾病。



室溫可存放 6 個月。*

檢測程序†



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加註到檢體管。



2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。



3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP 4Dx Plus 裝置的檢體孔中。



4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **8 分鐘**時可讀取結果。

全血[§]、血清
或血漿檢體

陽性對照組

E. canis/*E. ewingii* 抗體

B. burgdorferi 抗體

A. phagocytophilum/

A. platys 抗體

D. immitis 抗原

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snap4dxplus。

*檢測套組於室溫下至多儲存 6 個月。若未儲存於室溫下，檢測套組冷藏可保存至有效日期。
完整儲存規定請參閱包裝內仿單。

†開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。


§抗凝血全血 (如 EDTA、肝素)。

SNAP[®] 心絲蟲 RT 檢測

每年篩檢有無心絲蟲。



檢測程序*

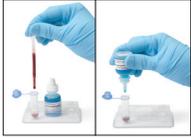

1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加注到檢體管。



2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。



3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP 心絲蟲 RT 裝置的檢體孔中。



4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **8 分鐘**時可讀取結果。



如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/heartworm。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。
†抗凝血全血 (如 EDTA、肝素)。

SNAP* 貓三合一檢測

為所有新入住、有風險及有症狀的貓咪檢測貓愛滋病毒 (FIV) 和貓白血病毒 (FeLV)。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加注到檢體管。



2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。



3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP 貓三合一檢測裝置的檢體孔中。




4. 使用 SNAP Pro[†] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **10 分鐘**時可讀取結果。

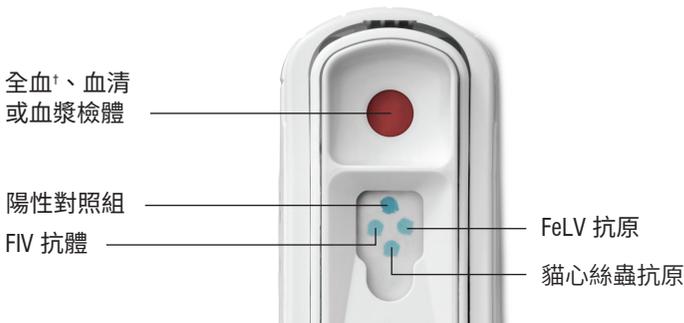

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snappelinetriple。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。
†抗凝血全血 (如 EDTA、肝素)。

SNAP[®] FIV/FeLV 二合一快速檢測

為所有新入住、有風險及有症狀的貓咪檢測貓愛滋病毒 (FIV) 和貓白血病毒 (FeLV)。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加註到檢體管。



2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。



3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP FIV/FeLV 二合一快速檢測裝置的檢體孔中。




4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **10 分鐘**時可讀取結果。

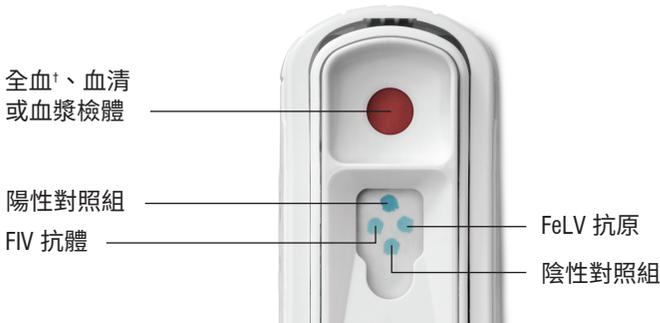

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snapcombo。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

[†]抗凝血全血 (如 EDTA、肝素)。

SNAP[®] cPL[®] 檢測

為出現嘔吐、厭食和/或腹痛症狀的病犬進行檢測。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加註到檢體管。
2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。
3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP cPL 裝置的檢體孔中。
4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。
或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。
5. **10 分鐘**時可讀取結果。



異常

檢體點的颜色與參考點相同或較深。



正常

檢體點的颜色比參考點淺。

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snapcpl。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

SNAP[®] fPL[®] 檢測

為出現嗜睡、食慾減退、脫水、體重下降、嘔吐和/或下痢症狀的貓進行檢測。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加註到檢體管。
2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。
3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP fPL 裝置的檢體孔中。
4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。
或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。
5. **10 分鐘**時可讀取結果。



異常

檢體點的颜色與參考點相同或較深。



正常

檢體點的颜色比參考點淺。

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snapfpl。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。


SNAP* 犬細小病毒檢測

為出現突然嗜睡、嘔吐、發燒和下痢症狀的病犬進行檢測。



可儲存於室溫下。*

檢測程序†

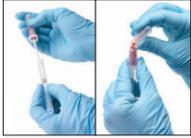

1. 以棉棒沾取檢體‡並將棉棒尖端插入管中。彎曲球部端，以破壞封阻、釋出結合液。



2. 擠壓並放開球部**3次**，以混合檢體及結合液。



3. 擠壓球部，加注**5滴**到 SNAP Parvo 裝置的檢體孔。



4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或

當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **8分鐘**時可讀取結果。



如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/parvo。

*完整儲存規定請參閱包裝內仿單。

†開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

‡採檢棒不可直接用於插入直腸。

SNAP* 梨形鞭毛蟲檢測

為出現下痢症狀的犬貓進行檢測。



檢測程序*



1. 以棉棒沾取檢體[†]，並將棉棒尖端插入管中。彎曲球部端，以破壞封阻、釋出結合液。



2. 擠壓並放開球部 **3次**，以混合檢體及結合液。



3. 擠壓球部，加注 **5滴**到 SNAP Giardia 裝置的檢體孔。



4. 使用 SNAP Pro[†] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **8分鐘**時可讀取結果。



如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/giardia。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。
[†]採檢棉棒不可直接用於插入直腸。

SNAP[®] 貓 proBNP 檢測

為有心臟病風險的貓 (心雜音、心律不整、呼吸道徵兆、麻醉前、種別、病史、年齡) 進行檢測。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **5 滴綠色結合液** 加注到檢體管。



2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。



3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP 貓 proBNP 裝置的檢體孔中。



4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。

或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。



5. **10 分鐘**時可讀取結果。

血清或 EDTA
血漿檢體

參考點



異常

檢體點的颜色與參考點相同或較深。



正常

檢體點的颜色比參考點淺。

如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snapprobnp。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

SNAP[®] Lepto 快速檢測

為疑似有**鉤端螺旋體症**症狀的病犬進行檢測。



檢測程序*



1. 使用隨附的移液管，將 **3 滴檢體** 和 **4 滴結合液** 加註到檢體管。
2. 輕輕**倒轉 3-5 次** 以混合。
3. 將檢體管的所有內容物倒入 SNAP Lepto 裝置的檢體孔中。
4. 使用 SNAP Pro[®] 分析儀，自動啟動 SNAP 檢測及解讀結果。
或
當活化孔**開始**顯示顏色，用力按下以啟動。您會清楚聽到「啪」一聲。
5. **10 分鐘**時可讀取結果。



如需詳細資訊或欲訂購本檢測套組，請瀏覽 idexx.com/snapplepto。

*開始進行任何檢測前，請參閱包裝內仿單完整指示。

